

# Handleiding

MY BEAKER ERIK JANSSEN

## Inhoudsopgave

1
2
6
7
8
9
9
10
10
11
11
13
14

		Ap	op installeren	
	습	www.mybeaker.nl My Beaker	C	<ul> <li></li></ul>
		Bestellen		Bestellen
		Downloaden handleiding		Downloaden handleiding
		Downloaden informatie		Bestand downloaden?
		Downloaden app		app-1.0.apk Dit bestandstype kan schadelijk zijn voor uw telefoon. Download dit bestand alleen als u de bron vertrouwt.
		f 🖾 in		Annuleren Downloaden
1.	Open druk	met de telefoon de cop de knop down	e website en loaden app	2. Druk op downloaden
	0 M		_	< Onbekende apps installeren
				Samsung Internet
				Toestaan van deze bron
				Uw telefoon loopt mogelijk risico als u apps van deze bron installeert.
	Sa Sa	msung Internet		
	Uit veiligh toestemr te installe	heidsoverwegingen heeft je telefoor ming om onbekende apps van deze eren.	n geen bron	
	Ar	nnuleren Instellingen		
3.	De te	lefoon vraagt voor te wijzigen	instellingen	4. Zet toestaan van deze bron aan

n update voor deze bestaande app n? Je huidige gegevens gaan niet Hiervoor is geen speciale toegang	
	App geïnstalleerd.
Annuleren Installeren	Gereed

6. Als de app geïnstalleerd is kun je hem openen.

Tip: Kan zijn bij het openen van de app dat word gevraagd of de bluetooth geopend kan worden, klik dan op ja.

### Batterij verwisselen



7. Beaker open draaien



8. Batterij erin stoppen Let op dat je deze schuin erin duwt



9. Duw op de batterij



 Duw het lipje, rood omcirkeld, naar buiten
 Tip: Pak een pen en zet de opening op het lipje en druk deze naar buiten dan springt de batterij omhoog.



11. Haal de batterij eruit





13. Monitor het batterijniveau

(+- 4 weken is de levensduur van de batterij met 1 keer uitlezen per dag (zie verbinden stap 1 nieuwe patiënt)

	±¢2 %×	ຈີຈຸມຟ 64% 🛢 17:17		đ	*	🗙 🖘 ով 64% 🗎 17:17
	Activeer een beker om te verbinden			Battery: 100%		SETTINGS
	.II MyBeaker	VERBIND				
					3 ml	
	CSV DOWNLOAD			DISCONNECT		DOWNLOAD
	<b>di</b> statistieken	* home		statistieken		<b>*</b> home
1.	Verbind met de beke	r	2.	Druk op setting	gs	
	Battery: 100%	SETTINGS		Battery: 100%	*	SETTINGS
	Му			<sub>My</sub> Voornaar	n/voo	orletters
	Tussenvoegsel			Tussenvoegsel		
	Beaker			Beaker	Acht	ernaam
	1			<u>1 Ka</u>	mern	ummer/
	Nieuwe gebruiker toevoegen			- Nieuwe gebruiker	huis toevoege	nummer
	OPSLAAN ANNULI	ER		OPSLAAN	ANNU	JLEER
	statistieken	* home		statistieken		* home
~						

## Nieuwe patiënt toevoegen

3. Met dit overzicht kan je de settings 4. Vul de patiënt gegevens in veranderen

<b>P</b>	₹ \$	17:18 🛱 🐔 🖌 🕷
		SETTINGS
	Му	
	Tussenvoegsel	
	Beaker	
	1	
[	Nieuwe gebruiker toevoege	en
	_	
	OPSLAAN ANN	ULEER
	statistieken	<b>*</b> home

 Selecteer of het een nieuwe patiënt is die de beaker nog <u>nooit</u> heeft gebruikt\*

2	🖇 🔌 🖘 ւմ 64% 🛢 17:18
Battery: 100%	SETTINGS
Му	
Tussenvoegsel	
Beaker	
1	
Nieuwe gebruiker toev	voegen
OPSLAAN	ANNULEER
statistieken	* home

6. Druk op opslaan om de beker aan een andere/nieuwe patiënt te

\* Mocht de patiënt een Beaker al eens gebruikt hebben vink je nieuwe gebruiker <u>niet</u> aan. Weet je dit niet zeker in het overzicht user kan je zien wie een My Beaker gebruikt heeft.

## Naam op de beker zetten

Maak een label met de label writer op de afdeling en plak dit op de beker



3. Stop de wikkel erin

4. Draai My Beaker dicht

## Inschenken

Beweeg de beker nadat je hem volschenkt en zet hem op een vlakke ondergrond



Tip: zet de beker op de tafel of nachtkastje wanneer je het de patiënt/cliënt geeft





Deksel dat meegeleverd is kan op beker geplaatst worden als hulpmiddel.

Warme en koude dranken kunnen in deze beker geschonken worden. De beker is isolerend, wat betekent dat de warme en koude vloeistoffen langer op temperatuur blijven.

Let op voor verbranding van de tong en mond !

## Live weergave van vloeistof in de beker



- 1. Verbind met de beker
- 2. Vul de verbonden beker met vloeistof

Verkrijgen van de data

#### 3. Zie live vloeistof niveau



1. Open de app en druk op verbind



2. Druk op download, metingen opgeslagen zal verschijnen



3. Druk op statistieken voor een overzicht

🖬 🖬				* 🗶 🗟 📶	63% 🛢 17:22			
VAND	AAG	WEEK		MAAND	USER			
	Geselecteerde gebruiker My Beaker 1							
Gecc 2019	onsumeer 9-04-18 17	d: 7:20:44	95 ml					
Aang Geco 2019	geboden: onsumeer 9-04-18 17	<sup>.</sup> d: 7:21:24	270 m 112 m	I 				
Aang Geco 2019	geboden: onsumeer 9-04-18 17	rd: 7:21:41	158 m 74 ml	I				
Aang Niet 2019	geboden: geconsur 9-04-18 17	neerd 7:21:51	84 ml 7ml					
Aang Geco 2019	geboden: onsumeer 9-04-18 17	rd: 7:22:17	234 m 136 m	 				
Aang Geco 2019	geboden: onsumeer 9-04-18 17	rd: 7:22:29	98 ml 95 ml					
1	Totaal geconsumeerd: 0,718 l Totaal niet geconsumeerd: 0,007 l							
	statistie	ken		* home				

6. Zie week en maandoverzicht

E []		* 🗶 🦷	.ııl 63% 🛢 17:			
VANDAAG	WEEK	MAAND	USER			
G	eselecteer	de gebruik	er			
My Beaker 1						
Geconsume	erd: 95	ml				
2019-04-18	17:20:44					
Aangebode	n: 27	'0 ml				
Geconsume	erd: 11	2 ml				
2019-04-18	17:21:24					
Aangebode	n: 15	i8 ml				
Geconsume	erd: 74	ml				
2019-04-18	17:21:41	mal				
Niet geoons	n: 84 Sumeerd 7n	- mi ol				
2019-04-18	17:21:51					
Aangebode	n: 23	4 ml				
Geconsume	erd: 13	6 ml				
2019-04-18	17:22:17					
Aangebode	n: 98	ml				
Geconsume	erd: 95	ml				
2019-04-18	17:22:29					
Totaal	geconsun	neerd: 0,71	81			
Totaal	niet aecor	nsumeerd:	0.007 I			
			<b>b</b>			
etatiet	ieken	bo	<b>A</b>			
Statist	ickell					
Rood bet	ekent r:	niet gedr	ronken			

VANDAAG	WEEK	MAAND	USER				
G	Geselecteerde gebruiker My Beaker 1						
Geconsume 2019-04-18	eerd: 95 17:20:44	ml					
Aangebode Geconsume 2019-04-18	n: 27 eerd: 11: 17:21:24	0 ml 2 ml					
Aangebode Geconsume 2019-04-18	n: 15 eerd: 74 17:21:41	8 ml ml					
Aangebode Niet gecons 2019-04-18	n: 84 sumeerd 7n 17:21:51	ml าไ					
Aangebode Geconsume 2019-04-18	n: 23 eerd: 130 17:22:17	4 ml 5 ml					
Aangebode Geconsume 2019-04-18	n: 98 eerd: 95 17:22:29	ml ml					
Totaal geconsumeerd: 0,718 l Totaal niet geconsumeerd: 0,007 l							
statis	tieken	) ho	me				

7. Zie onder het lijstje je dag, week of maand totaal

#### Overzicht zonder connectie met My Beaker



1. Ga naar statistieken



3. Kies het overzicht



 Ga naar user om de patiënten te zien



4. Ga naar user om andere patiënt te zien

## Excel download

🖬 🐻 🕹 🐔 Ŝull 63% 🖹 17:22							
VANDAAG	WEEK	MAAND	USER				
Ge	Geselecteerde gebruiker My Beaker 1						
Geconsumee 2019-04-18 1	erd: 95 7:20:44	ml					
Aangeboden Geconsumee 2019-04-18 1	: 27 erd: 112  7:21:24	u mi 2 ml					
Aangeboden Geconsumee 2019-04-18 1	: 15 erd: 74 7:21:41	8 ml ml					
Aangeboden Niet geconsu 2019-04-18 1	: 84 imeerd 7n 7:21:51	ml 1					
Aangeboden Geconsumee 2019-04-18 1	: 23 erd: 136 7:22:17	4 ml 5 ml					
Aangeboden Geconsumee 2019-04-18 1	: 98 erd: 95 7:22:29	ml ml					
Totaal geconsumeerd: 0,718   Totaal niet geconsumeerd: 0,007							
statistie	eken	k hoi	me				

1. Druk op home als je in statistiek overzicht bevindt om Excel download te maken



 Druk op CSV download voor een Excel download. Deze staat in het mapje downloads van je telefoon